



Wilaplat Zubehör

Leitsilberpulver

Artikel Nr.: 3060300202

Beschreibung

Leitsilberpulver eignet sich sehr gut für die Galvanoplastik. Das Pulver ist sehr fein, trocknet fest und ist wasserunlöslich. Zudem besitzt es eine hohe mechanische Festigkeit. Mit einem Pinselstrich Leitsilberpulver werden alle Materialien (Kunststoff, Holz usw.) elektrisch leitfähig.

Verarbeitung

Die Ware muss vor dem Aufpinseln von Leitsilberpulver fettfrei und sauber sein. Wir empfehlen, **vorher** mit Alkohol oder Ultraschall zu entfetten. Nachdem das Pulver aufgetragen ist, sollten zu lange Entfettungszeiten vermieden werden, ebenso wie Beanspruchungen durch Ultraschall oder die elektrolytische Entfettung. Um die feinen Pulverschichten von der Oberfläche zu entfernen, empfehlen wir Pressluft.

Trocknung

Lufttrocknend
Staub- und griff trocken: mind. 10-15 Minuten, besser ca. 30min
Minuten

Lagerfähigkeit

Vor Frost schützen. Verarbeitung über + 5 Grad Celsius

Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EWG - Sicherheitsdatenblättern.